

Korte gebruiksaanwijzing van de Kronos S 18 autoclaaf

Vul de autoclaaf met gedemineraliseerd water. Plaats de siliconen slang op de vulnippel aan de bovenzijde achter de deur en hang de slang in de jerrycan. Druk vervolgens de knop pomp (6.2) in op de voorzijde van de display, de pomp begint het water op te zuigen uit de jerrycan, deze stopt automatisch na 2 minuten of als de schoonwatertank vol is. Als de pomp gestopt is en de het symbool van de schoonwatertank (6.3) komt niet in beeld druk dan de pompknop nogmaals in.

Met de select knop (6.2) op de voorzijde van de autoclaaf kiest u het gewenste programma. Bij verpakte roestvrijstalen producten kiest u massief verpakt 134 graden. Bij niet verpakte roestvrijstalen producten kiest u massief onverpakt 134 graden.

Als u de materialen in de autoclaaf geplaatst heeft sluit u de deur door deze aan de rechterzijde stevig dicht te drukken, deze sluit dan automatisch.

Druk vervolgens op de knop start (6.2) en het programma begint automatisch. Tijdens het programma maakt de autoclaaf diverse geluiden, dit is normaal.

Aan het eind van de sterilisatie komt er een print uit de autoclaaf die aangeeft dat het proces oké is. Door op de knop deur (6.2) te drukken gaat deze weer open. Deze knop werkt alleen als de autoclaaf niet aan het steriliseren is.

Als de autoclaaf het symbool aangeeft dat de vuilwatertank vol (6.3) is dient deze geleegd te worden daar anders de autoclaaf niet start. U leegt de vuilwatertank door de siliconenslang op de onderste nippel te plaatsen en deze in te drukken. **BELANGRIJK! Vergeet niet de nippel voor het laten leeglopen van de vuilwatertank weer uit te trekken na gebruik, daar anders de autoclaaf gaat lekken tijdens het autoclaveren.**

Het is aan te bevelen om tijdens het vullen van de schoonwatertank met gedemineraliseerd water, meteen de vuilwatertank van de autoclaaf leeg te laten lopen. Dit beperkt het aantal handelingen.

Voor de symbolen kunt u kijken in het boekje hoofdstuk 6.2 en 6.3.

Het is van belang dat het materiaal wat in de autoclaaf gaat altijd zeer goed gereinigd en droog is. Wanneer u verpakte materialen in de autoclaaf plaatst dient dit zo min mogelijk op elkaar geplaatst te worden, zodat er rond het materiaal voldoende ventilatie is.

Mocht er een storing zijn dan geeft de sterilisator een foutmelding. U kunt in de handleiding zien wat de foutmelding betekend. In de meeste gevallen kunt u de autoclaaf zelf resetten.


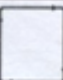

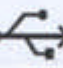



Het is bijzonder belangrijk dat u nooit de autoclaaf uitschakelt tijdens het sterilisatie proces.



Fa.A.Vos en Zoons
1^e Oosterparkstraat 64-66
1091 HC Amsterdam
Tel: 020-6942379



www.vosmedisch.nl

	De sleutel komt in beeld nadat het programma is begonnen en de autoclaaf vergrendeld is.
	Dit icoon geeft aan dat het programma is gestart, de pijltjes draaien rond.
	Dit icoon geeft aan dat het printerpapier op is of dat de printer niet goed afgesloten is. De autoclaaf maakt het programma wel normaal af.
S	Dit icoon geeft aan welk type autoclaaf u heeft.
	Softwareaansluiting voor USB, zie uitgebreide handleiding.
	Dit icoon geeft aan dat de schoonwatertank leeg is, er kan geen programma gestart worden. Vul de schoonwatertank met gedemineraliseerd water.
	Dit icoon geeft aan dat de schoonwatertank vol is.
	Dit icoon geeft aan dat de vuilwatertank vol is, er kan geen programma gestart worden. Leeg de vuilwatertank.

